





大腸モデル未セット

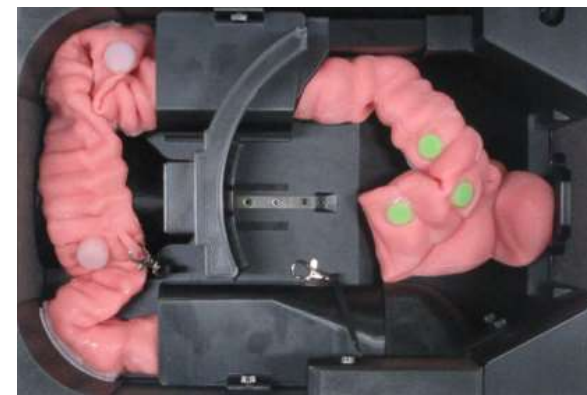

大腸モデルセット状態

① 内部にセットされている大腸モデルカバーを外す

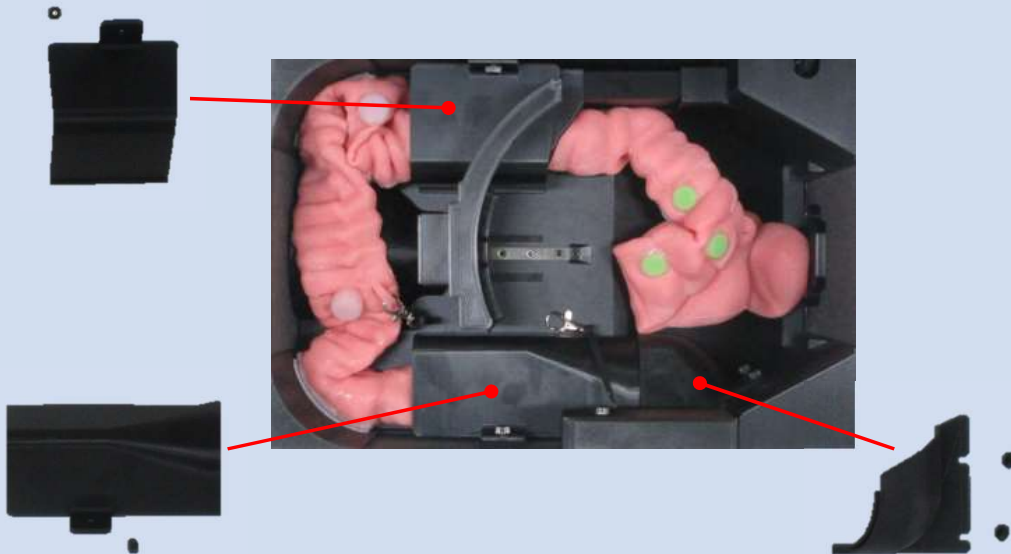


3つある大腸モデルカバーを外す。

② 大腸モデルの固定フックを外す




横行結腸部では樹脂バネに固定されたフックを取り外す。S状結腸部は側面カメラ下側から伸びた伸長式の樹脂バネの固定フックを外す。

③ 肛門カバーを外す

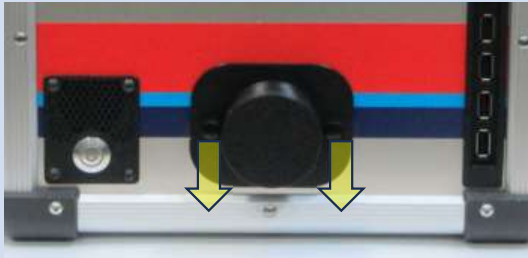

2つのネジを取り、肛門カバーを外す。
肛門キャップも同時に外しておく。

④ 肛門部を内側に入れる

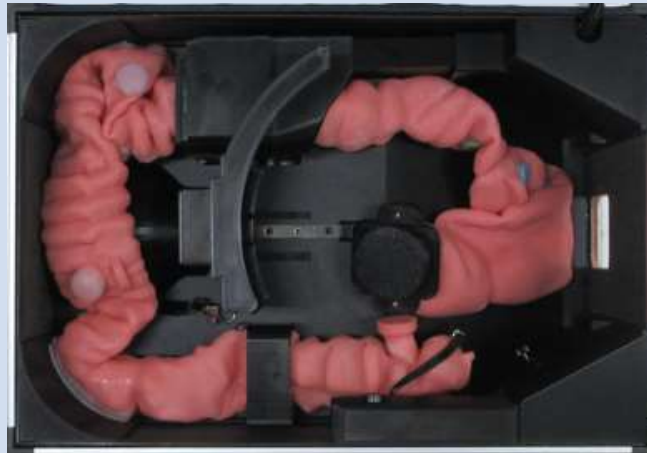

肛門カバーを外した後、肛門部を内側に入
れて潤滑剤が漏れないように肛門
キャップを取付けておく。

⑤ 盲腸部を外す




盲腸部を掴まんで、ゆっくり引張り固定
してある面ファスナーから外す。

大腸モデル交換マニュアル（取外し）



R ZERO INC.

⑥ 上行部を外す

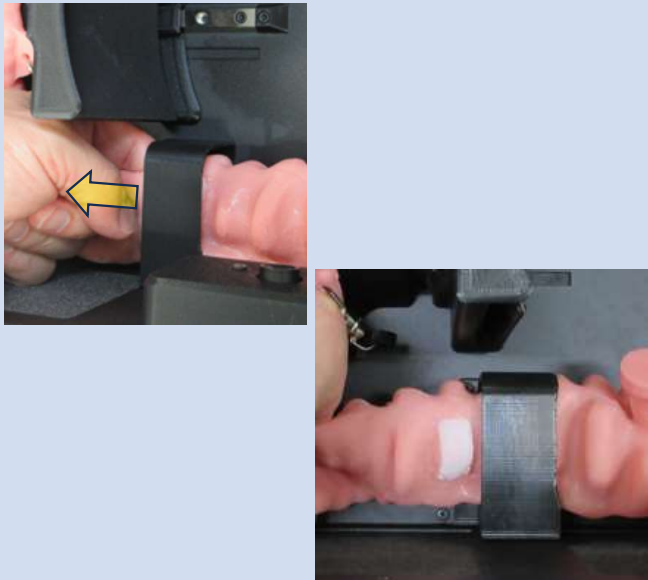


上行部を矢印の方向に引き出し面ファスナーから外す。

⑦ 菅彎、脾彎部を外す




菅彎曲部と脾彎曲部の箇所を内側にゆっくりを引張り、面ファスナーから外す。

⑧ 下行部のケースから引き出す

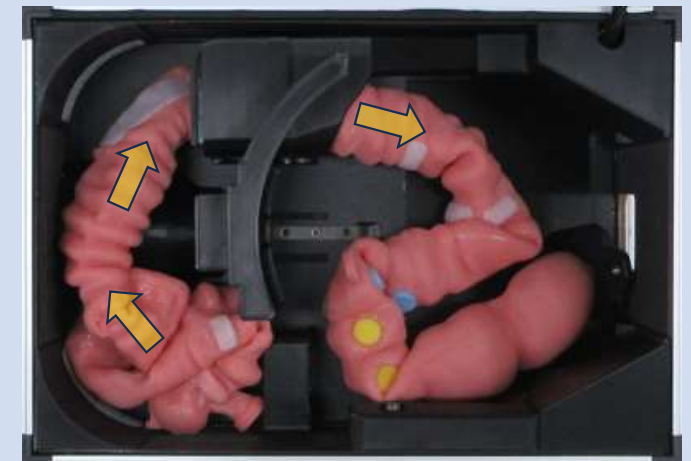


下行部に取付けてある面ファスナーを外し、少しずつ大腸モデルを肛門側に引き出す。

⑨ 下行部から引き出す

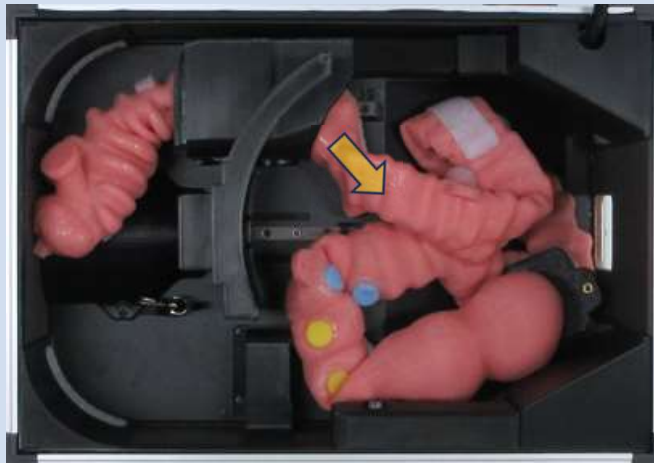

ゆっくりと引き出しを続ける。

⑩ 肛門部まで引き出す

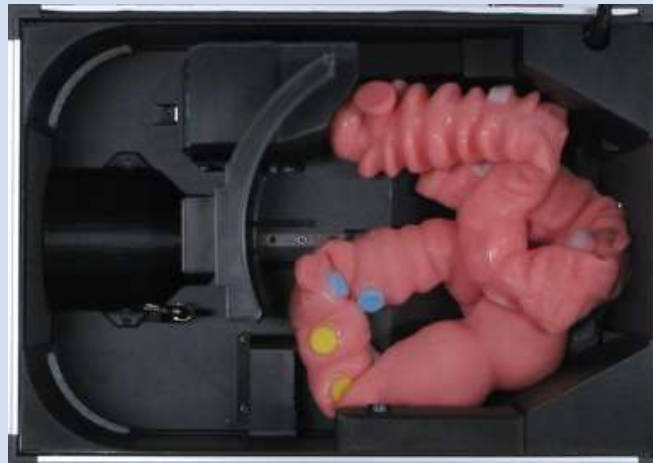

全て引き出す。

⑪ 大腸モデルを取り出す



大腸モデルを外した状態。

大腸モデル交換マニュアル（取付け）

① 大腸モデルを装置内に入れる




大腸モデルを肛門側のスペースに入れる。
※潤滑剤が装置内部に漏れないよう肛門部には肛門カバーを差し込んでおく。

② 下行部のケースから挿入する




下行部のケースから盲腸を挿入して引き出す。

③ 脾彎曲部まで引き出す

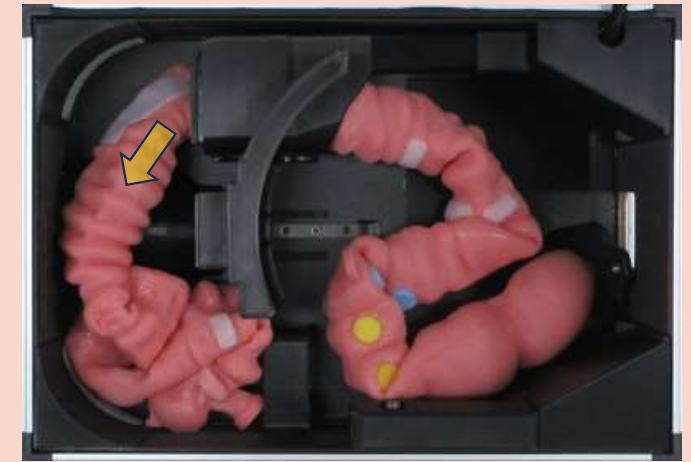

大腸モデルの脾彎曲部に貼ってある面ファスナーが下行部のケース内から出てくるところまで大腸モデルを引き出す。

④ 上行部の樹脂カバーの下を通す

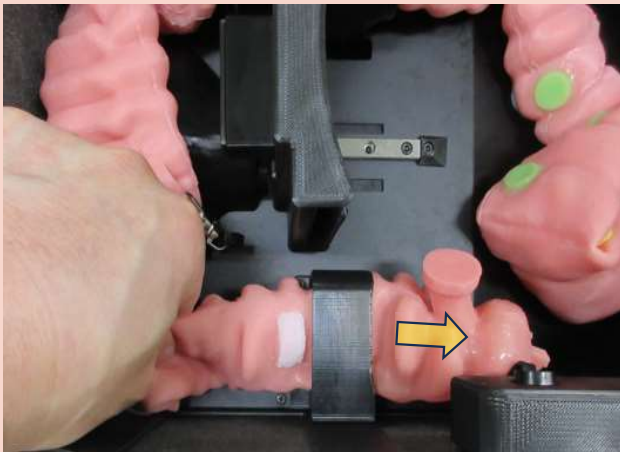

面ファスナーが上側を向いている状態で上行結腸部の樹脂カバーの下側を通す。

⑤ 盲腸部の位置まで引き出す




盲腸部の面ファスナーが付いている箇所を装置壁面に面ファスナーが付いている箇所まで引き出す。

⑥ 大腸モデル全体を配置




大腸モデル全体が装置内所定の位置に配置された状態。
次に各箇所の面ファスナーを取付けていく。

⑦ 面ファスナーの取付け位置

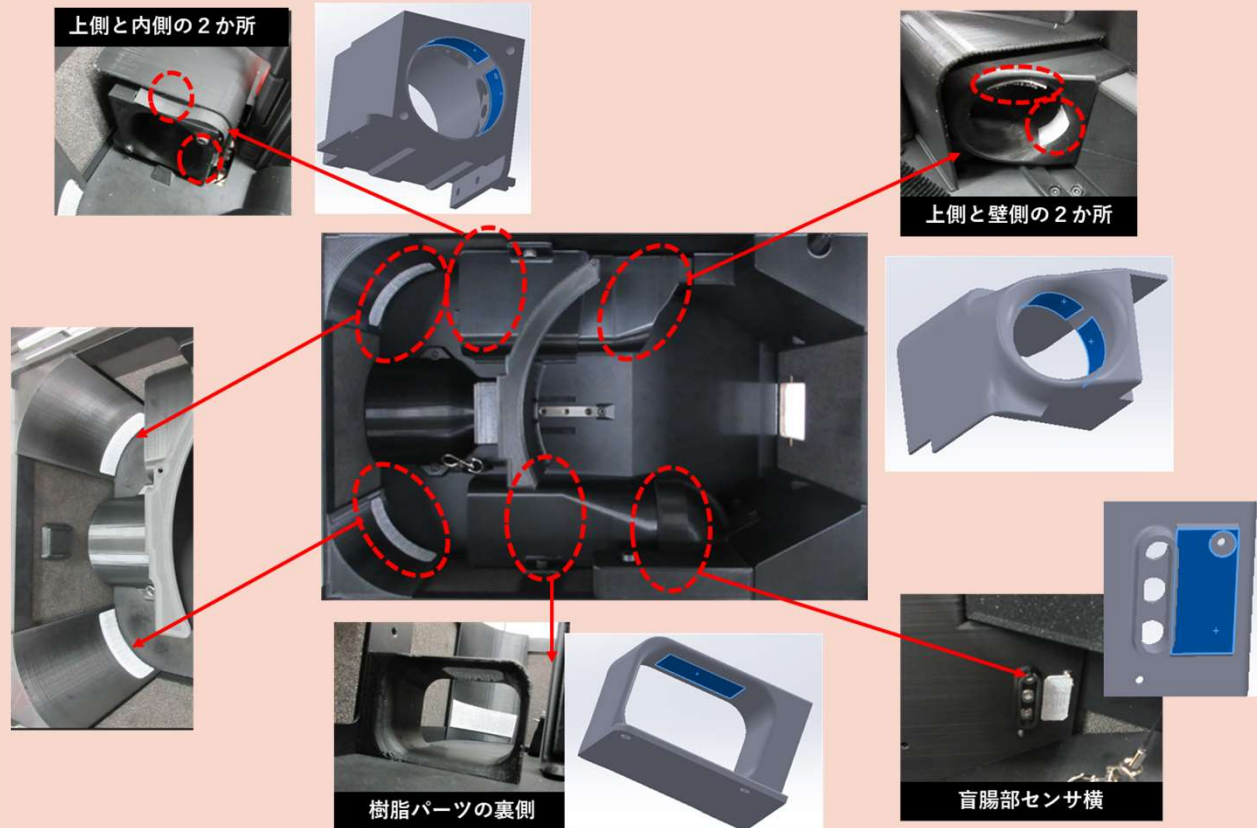

⑦-1 面ファスナー取付け（脾彎曲部）

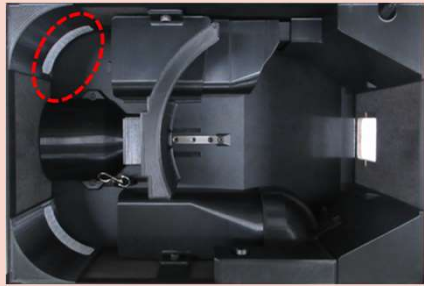





面ファスナーのオスメスの位置が合うように大腸モデルの位置を調整し、面全体を指で押しながらしっかりと取り付ける。
※位置がずれた場合は剥がして貼り直す。

⑦-2 面ファスナー取付け（肝彎曲部）





面ファスナーのオスメスの位置が合うように大腸モデルを調整し、面全体を指で押しながらしっかりと取り付ける。

⑦-3 面ファスナー取付け（上行部）

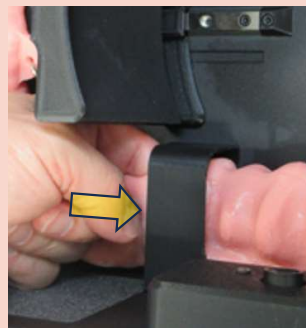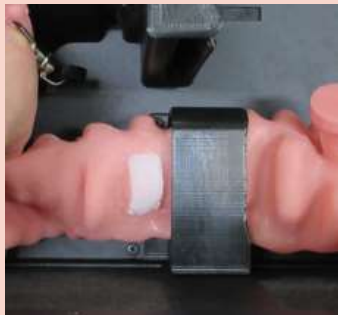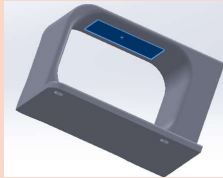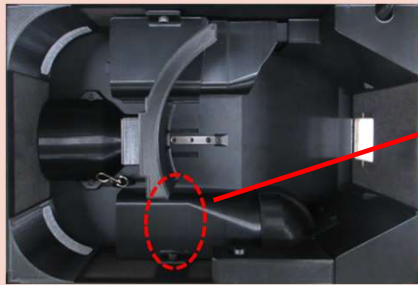


上行部の面ファスナーの位置を合わせ、大腸モデルの下側から樹脂パーツの裏側に押し当ててしっかりと取り付ける。

⑦-4 面ファスナー取付け（盲腸部）

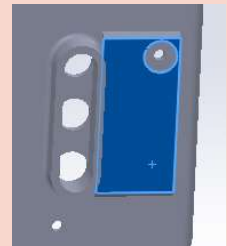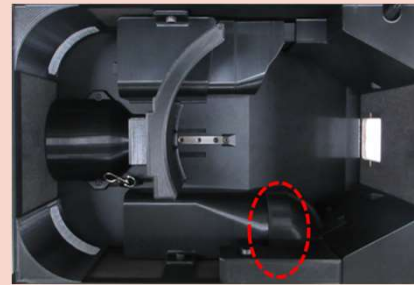

盲腸部の面ファスナーのオスメスの位置が合うようにモデルを調整し、面全体を指で押しながらしっかりと取り付ける。

⑦-5 面ファスナー取付け（下行部奥側）

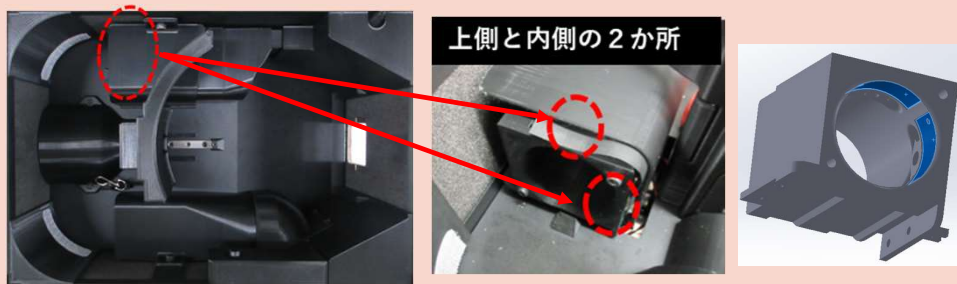

内側





上側

内側の面ファスナーを合わせた後で、上側の面ファスナーを合わせしっかりと取り付ける。

※取付の際は手の入る作業スペースを確保するため、トレーニングの中級の位置に移動させて行ってください。

⑦-6 面ファスナー取付け（S状部）

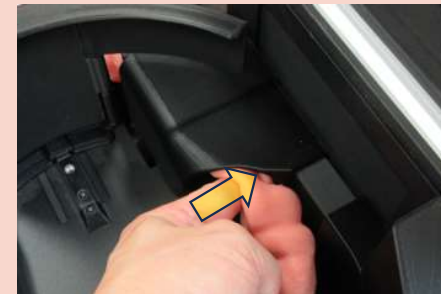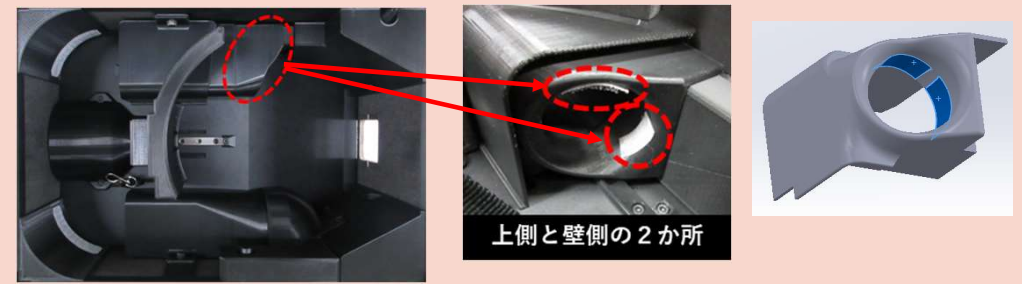


壁側



上側

壁側の面ファスナーを合わせた後で、上側の面ファスナーを合わせしっかりと取り付ける。


⑧ 盲腸部の樹脂カバーの取付け

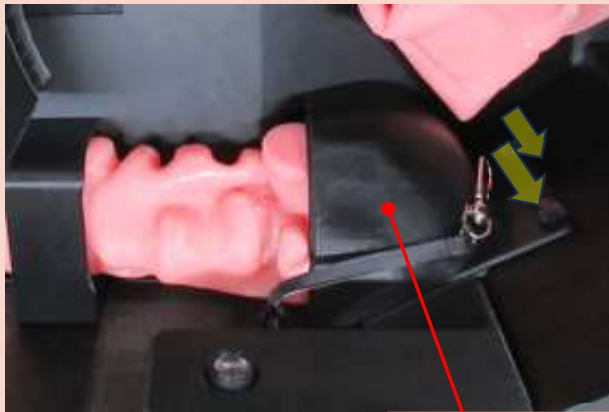

盲腸部の樹脂カバーはネジを2箇所固定して取り付ける。

※ネジは使用中及び装置の移動中などに外れないようしっかりと締めてください。


⑨ 上行結腸部の樹脂カバーの取付け

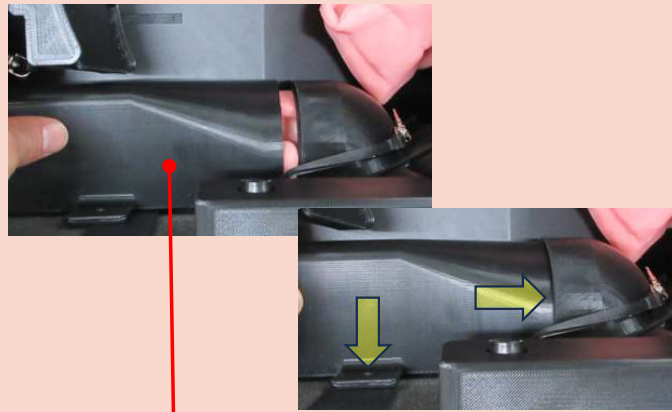

上行結腸部の樹脂カバーをスライドさせながら盲腸部樹脂カバーに嵌め込む。ネジ穴位置を合わせて固定する。

※ネジは使用中及び装置の移動中などに外れないようしっかりと締めてください。

⑩ 下行結腸部の樹脂カバー取付け

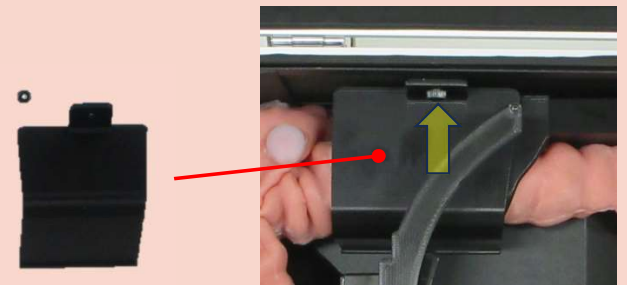

SDJのケースの上にスライドさせながら樹脂カバーをネジ穴位置を合わせて固定する。


※ネジは使用中及び装置の移動中などに外れないようしっかりと締めてください。

⑪ 大腸モデル固定用フックの取付け




横行結腸部では樹脂バネに固定したフックを取付け、S状結腸部では側面カメラ下側から取り付けた伸長式の樹脂バネに固定したフックを取付ける。

⑫ 肛門部の固定

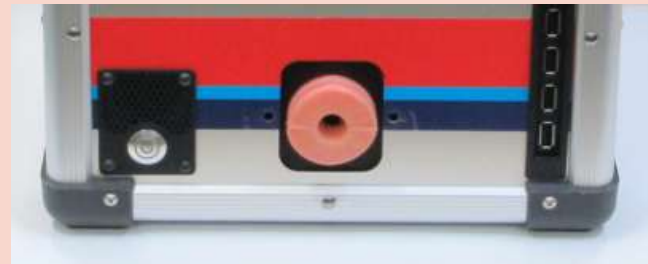

肛門部の樹脂プレートに記載されている「UP」という文字を本体内部で上方向にして肛門部の開口部から出す。
※この作業の時には肛門キャップは外して行うこと。

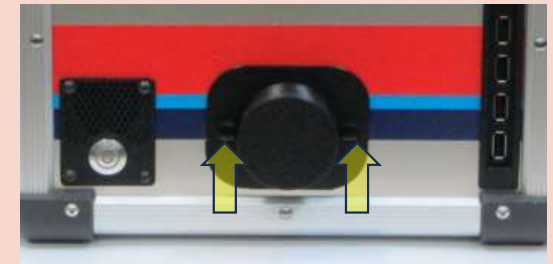

肛門口に潤滑剤塗布ツールを被せ、装置の内側から肛門部の樹脂プレートを押さえながらネジにて固定する。

取付完了